

Handleiding

Universele Tilband

(Universal Sling Prism Medical)



Toepassing

De universele tilband is ontworpen om personen van een zittende naar een liggende positie te tillen/begeleiden of visa versa. Degene die de persoon in de tilband begeleid dient een verzorger te zijn die ervoor getraind is dit soort handelingen te verrichten. Verzorgers dienen altijd getraind te zijn in o.a. het aanleggen van een tilband, de transfer van de ene naar de andere positie en hoe om te gaan met het plafond gemonteerd tilsysteem.

Visuele controle voor ieder gebruik

Prism Medical tilbanden zijn geproduceerd volgens de richtlijnen van BS EN 10535:2006 “Tilstelsysteem voor transfer van gehandicapten/ ouderen “. Telkens alvorens de tilband te gebruiken en na het wassen van de tilband dient de tilband visueel te worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. Beschadigde tilbanden dienen altijd vervangen te worden en mogen niet meer gebruikt worden.



Op het label in de tilband staat belangrijke informatie over die tilband, als dit label niet meer leesbaar wordt in de regel geadviseerd om de tilband te vervangen.

Bij een visuele inspectie dient op de volgende punten te worden gelet: zichtbare beschadiging aan de lussen van de tilband, loslatende stiksels, zichtbare beschadiging aan de stof van de tilband, zichtbare kleurverandering van de stof van de tilband en of de tilband compleet is, let hierbij op lussen, balijnen enz. Is het label in de tilband nog goed leesbaar?

Uitwisselbaarheid van verschillende merken


Het gebruik van tilbanden i.c.m. tilliften van verschillende merken is in principe mogelijk. Ongeacht het type en merk van de tilband of lift is er altijd een risico beoordeling. Uiteraard dient het bevestigingssysteem van de tilband (bijvoorbeeld lussen of clips) afgestemd te zijn op het bevestigingssysteem van het betreffende tiljuk (tweepuntsjuk / kanteljuk).

Neem contact op met Domicare als u een vraag heeft over het gebruik van uw tilband i.c.m. een tilsysteem van een andere fabrikant.

Maximaal tilgewicht

Het maximaal te tillen gewicht staat op het label in de tilband vermeld. Let wel, bij gebruik i.c.m. met de tillift en het tiljuk is altijd het minimaal aangegeven gewicht bepalend. Overschrijd nooit het maximaal te tillen gewicht.

Afmetingen

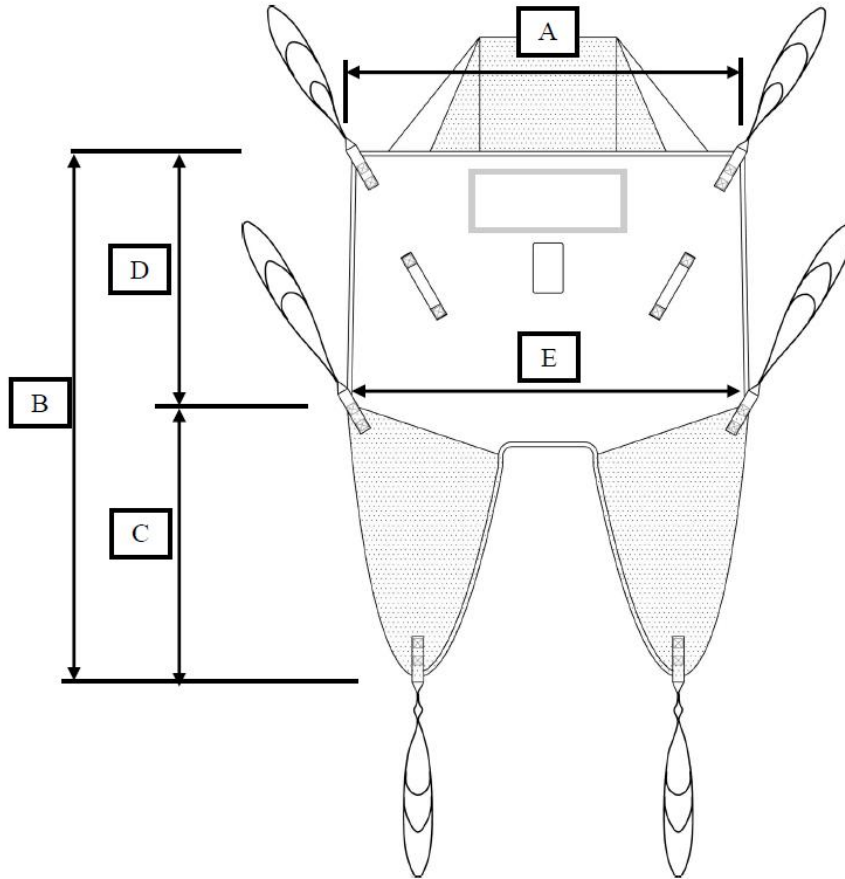

	A	B	C	D	E
Child	610	770	390	380	610
Junior	750	940	490	450	750
Small	825	1050	560	490	850
Medium	990	1215	660	555	1025
Large	1070	1350	710	640	1120
X Large	1150	1440	740	700	1200

(De opgegeven maatvoering kunnen afwijken t.o.v. de werkelijkheid met +/- 20mm)

Tillen vanuit een zittende positie

Plaats de tilband tussen de rugleuning van de stoel en de gebruiker



Plaats de tilband tussen de rugleuning van de stoel en de gebruiker en laat de gebruiker iets voorover buigen of duw de gebruiker zachtjes iets naar voren. Plaats uw hand op de tilband en volg met uw hand de ruggengraat tot op de zitting van de stoel. Plaats uw hand tussen de draagband (binnenzijde) en de heup van de gebruiker tegen de rugleuning van de stoel en duw de draagband goed omlaag tot op het zitvlak. Houdt de ene hand in deze positie, terwijl u met de andere hand het beengedeelte van de draagband naar de knie van de gebruiker brengt.

Plaats het beengedeelte onder het dijbeen



Plaats het beengedeelte van de draagband onder het dijbeen. Indien de benen van de gebruiker moeilijk te tillen zijn, schuif dan de draagband onder het dijbeen door, door met een hand op de stof te drukken aan de binnenkant van de draagband ter plaatse van het dijbeen, en met de andere hand het beengedeelte in de juiste positie te trekken.

Beenlussen altijd door elkaar te kruisen



De beenlussen van de universele tilband dient u altijd door elkaar te kruisen. Zorg ervoor dat de lussen bovenaan op gelijke hoogte zijn, zodat de gebruiker comfortabel wordt getild.

Bevestig de lussen van de achterzijde van de tilband (ruggedeelte) aan de haken aan de kant van degene die getild wordt. Bevestig de lussen aan de voorzijde (been gedeelte) aan de haken die het verst van degene die getild wordt zijn verwijderd.

Controleer of de lussen goed zijn bevestigd



Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift altijd of de lussen goed zijn bevestigd. Indien dit door de gebruiker als prettig wordt ervaren, kunt u de gebruiker vasthouden aan het bovenste gedeelte van de knie. Verwijder na het uitvoeren van de transfer de tilband om zo wrijving van de tilband op de huid te voorkomen.

Tillen vanuit een liggende positie

Plaats de tilband dubbelgevouwen achter de gebruiker



Rol de gebruiker op de zij en plaats de tilband dubbelgevouwen achter de gebruiker, rol de gebruiker vervolgens terug in de normale positie. Loop naar de andere zijde van het bed en leg de gebruiker nu op de andere zij zodat de tilband onder de gebruiker kan worden uitgerold. Zorg ervoor dat de tilband vlak ligt en plaats de gebruiker terug in de ligpositie.

Maak gebruik van de markeringen op de tilband om zo te controleren of deze zich op juiste hoogte van de ruggengraat van de gebruiker bevinden. Controleer of de tillussen zich aan de uiteinden bevinden.

Plaats de beenlussen onder en tussen de dijbenen



Plaats de beenlussen onder en tussen de dijbenen. Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk van het been rust in de tilband om zo maximaal tilcomfort te bereiken voor de gebruiker.



Beenlussen altijd door elkaar te kruisen



Belangrijk is dat de lussen aan de uiteinden van de beenlussen gekruist door elkaar gehaald worden voordat u gaat tillen. Bevestig de 6 tillussen correct aan het juk en de gebruiker kan getild worden.



Controleer of de lussen goed zijn bevestigd



Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift altijd of de lussen goed zijn bevestigd. Haal altijd de tilband weg om zo wrijving van de tilband op de huid te voorkomen. Om de tilband te verwijderen dient u bovenstaande procedure te herhalen alleen dan omgekeerd.

Hoofdondersteuning

De tilband is ook leverbaar i.c.m. hoofdondersteuning. De universele tilband voor gebruik in bad en douche (mesh) is voorzien van extra tillussen. Deze bevestigt u aan dezelfde haken van het juk waar ook de schouderlussen aan bevestigd zijn. De extra lussen van de hoofdondersteuning zijn verstelbaar om zo de gewenste positie voor achter het hoofd te kunnen garanderen en de juiste support.



Producent

Prism Medical UK, Unit4 Jubilee Business Park,
Jubilee Way, Grange Moor, Wakefield, WF 4TD.

Importeur Nederland

Domicare B.V., Zweedsestraat 8A13, 7418 BG Deventer.

