


Independent Lifter - Tilbeugel voor zelfstandig gebruik

*Nederlandse vertaling van de originele
gebruikershandleiding Prism Medical (USA) Rev: 2 SEPT 2015*

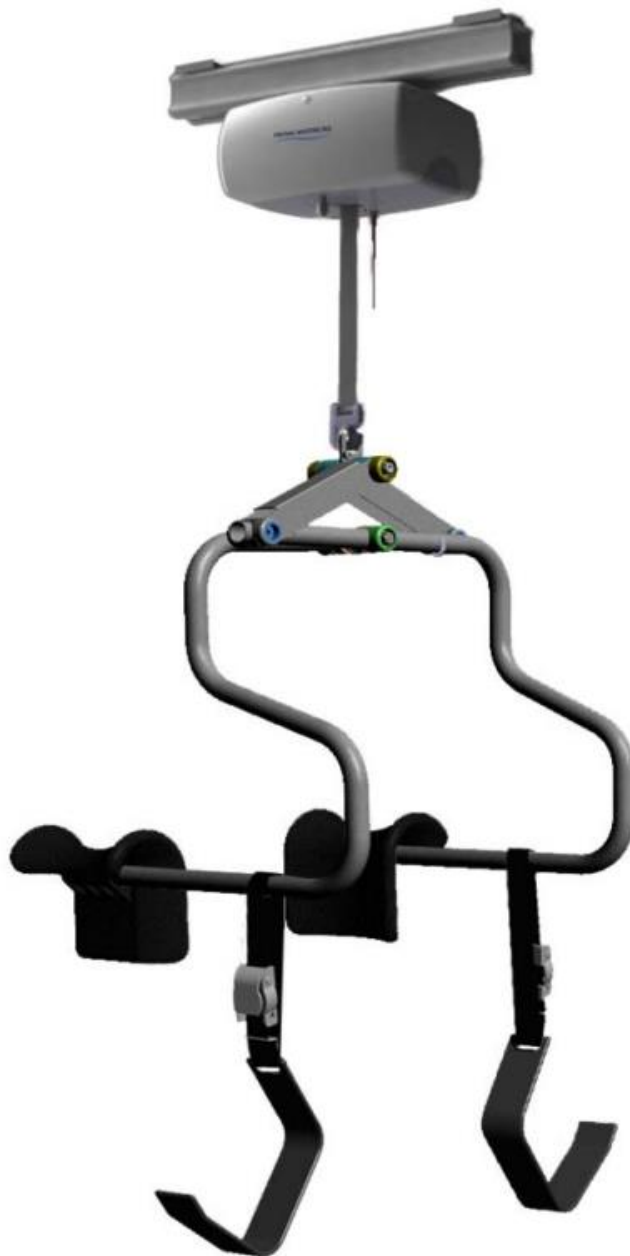

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	2
Overzicht van de Independent Lifter.....	2
Onderdelen van de Independent Lifter.....	3
Specificaties van de Independent Lifter.....	4
Waarschuwingen.....	5
Bevestigen van de Quick Release Haak.....	6
Bevestigen van de Independent Lifter.....	7
Losmaken van de Independent Lifter.....	7
Beensteunmaten.....	8
Maatrichtlijnen voor beensteunen.....	8
Beensteunen bevestigen aan Independent Lifter.....	9
Basisprincipes bij verplaatsen van een persoon.....	10
Algemene inspectie en onderhoud.....	12
Independent Lifter- Bevestigingspunten.....	13
Vervangingsonderdelen Independent Lifter.....	13
Veerspanning aanpassen aan maten.....	14
Onderhoudshistorie - Basisinformatie.....	15
Onderhoudshistorie.....	16
Garantie.....	19

INLEIDING

Alvorens dit apparaat te gebruiken en om te zorgen voor een veilige werking van uw Independent Lifter, moet u zorgvuldig deze hele handleiding lezen, met name het gedeelte over "Waarschuwingen".

De Independent Lifter is ontworpen voor gebruik in combinatie met Prism Medical plafondliften uitgerust met een Quick Release Systeem (QRS) haak en railsystemen. Raadpleeg alstublieft iedere gebruikershandleiding die met deze componenten is meegeleverd en raadpleeg deze tijdens het bekijken van deze handleiding.

Mochten er vragen zijn bij het lezen van deze handleiding, neem dan contact op met uw plaatselijke bevoegde Prism Medical vertegenwoordiger. Het niet naleven van de instructies in deze handleiding kan leiden tot letsel bij de gebruiker of de persoon die wordt getild of verplaatst. Ook kan er schade aan het tilapparaat en/of bijbehorende onderdelen ontstaan. Verzekert u er van dat de inhoud van deze handleiding volledig wordt begrepen voordat dit tilapparaat wordt gebruikt.

Bewaar deze handleiding bij de documenten die bij de Independent Lifter en accessoires zijn meegeleverd. De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.


Overzicht van de Independent Lifter

De Independent Lifter is een tilhulpmiddel bedoeld voor gebruik naast een verzorger. Dit tilapparaat maakt het mogelijk om personen met beperkte mobiliteit op te tillen met minimale belasting of risico, terwijl het de cliënt van volledige veiligheid, waardigheid en comfort voorziet. Dit apparaat is voornamelijk bedoeld voor cliënten met "enige" kracht in het bovenlichaam, cognitie, hoofd- en nekcontrole, "enige" heupcontrole, "enige" grijpkracht en "enige" kracht in de romp- en bekkenspieren.

De Independent Lifter is een van de twee componenten waaruit deze technologie bestaat. De tillift moet worden bevestigd aan een speciaal ontworpen Prism Medical plafondlift met behulp van een QRS-haak. Een QRS-haak moet afzonderlijk van de Independent Lifter besteld worden. Zie pagina 6 voor meer informatie over de QRS-haak. De Independent Lifter ondersteunt een persoon terwijl het optillen of verplaatsen plaatsvindt. Een plafondlift zou al geïnstalleerd of geleverd moeten zijn op het moment van aankoop. Raadpleeg alle bij de plafondlift meegeleverde gebruikershandleidingen en raadpleeg ze tijdens het lezen van deze handleiding.

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van de Independent Lifter door het schema op de volgende pagina te raadplegen.

Onderdelen van de Independent Lifter

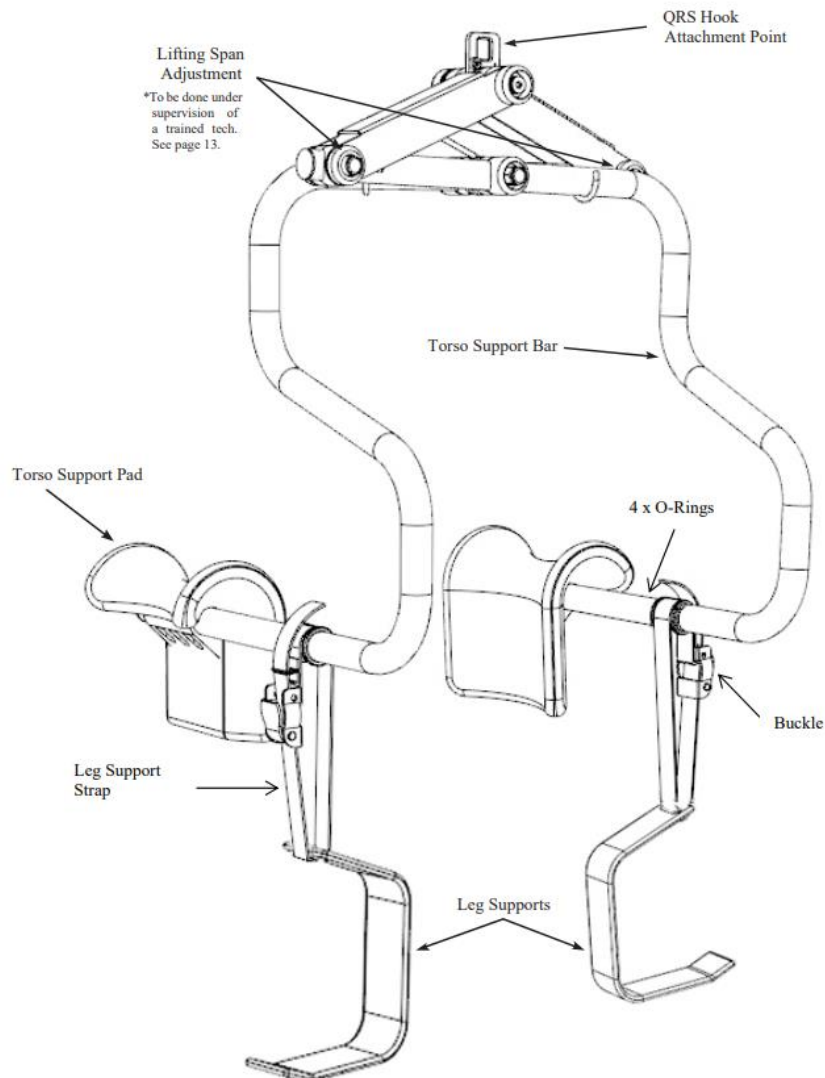

Lifting span adjustment; Tilbereik afstelling (*uitsluitend uit te voeren door geautoriseerde dealer, zie toelichting op pagina 13).

QRS Hook attachment point; bevestigingspunt t.b.v. "Quick Release" haak

Torso support pad; Torso-steunkussen

Torso support bar; Torso-steunstang

Leg supports; Beensteunen

4 x O-rings; ronde ringen t.b.v. positioneren beensteunbanden

Buckle; Gesp

Leg support strap; Beensteun-band

Specificaties van de Independent Lifter


Gewicht van de tilbeugel (inclusief beensteunen): 9.1kg.

Maximale belasting: veilige werklast 200kg.

Verwachte levensduur: 10 jaar

BELANGRIJK:

De maximale veilige werkbelasting van een tilsysteem is gelijk aan de minimale veilige werkbelasting van ieder van de systeemcomponenten. Bijv.: als een Independent Lifter met een veilige werkbelasting van 200kg is bevestigd aan een plafondlift met een veilige werkbelasting van 283kg, dan is de veilige werkbelasting van het systeem 200kg. (gelijk aan de veilige werkbelasting van het component met de minimale veilige werkbelasting).

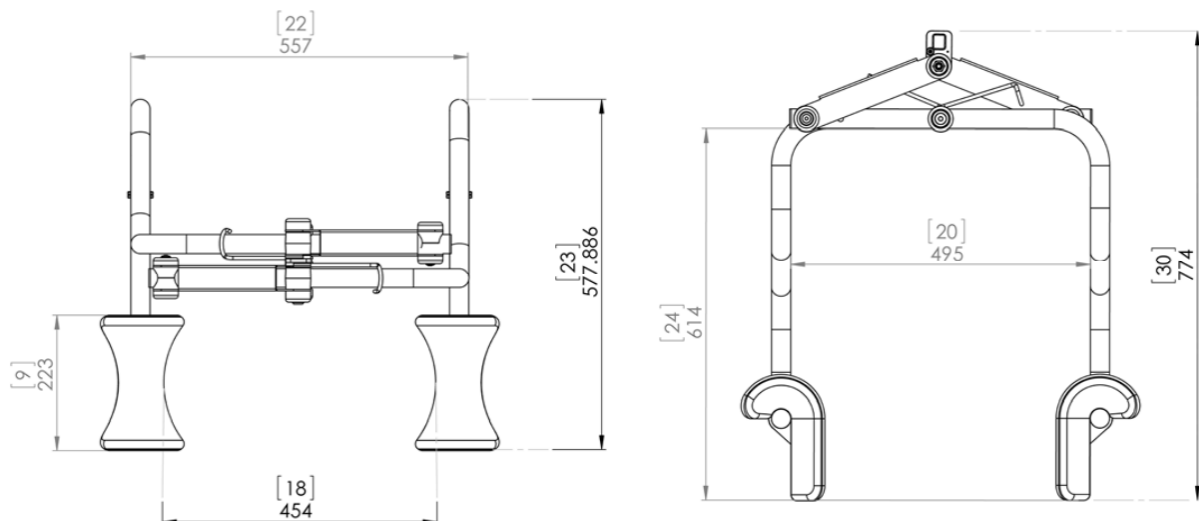



Waarschuwingen

- In geen geval mogen de Independent Lifter en de plafondlift de worden gebruikt door iemand die niet goed is opgeleid in het gebruik en onderhoud van deze apparatuur. Het niet naleven van deze waarschuwing kan resulteren in ernstig letsel aan de operator en/of de persoon die wordt opgetild/verplaatst.
- De Independent Lifter en plafondlift zijn geen speelgoed. Sta niet toe dat kinderen spelen met de tillift of een van haar onderdelen. De tillift is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- De fabrieksgarantie vervalt als personen die niet door Prism Medical zijn geautoriseerd, werk verrichten aan de Independent Lifter.
- In faciliteiten waar meer dan één operator verantwoordelijk is voor het gebruik van de Independent Lifter en plafondlift, is het noodzakelijk dat al deze personen worden opgeleid in het juiste gebruik ervan. Een trainingsprogramma zou moeten worden opgesteld door de instelling om nieuwe operators vertrouwd te maken met deze apparatuur.
- Hoewel de Independent Lifter is ontworpen voor incidenteel spetteren/blootstelling aan water, lange termijn blootstelling/onderdompeling in een vloeistof wordt niet aanbevolen. Het effect van vochtigheid/condens op de plafondlift moet ook worden overwogen.
- Om de optimale werking te behouden, moet de Independent Lifter op regelmatige basis worden geïnspecteerd en onderhouden. Zie het gedeelte "Algemene inspectie en onderhoud".
- De plafondlift of iedere accessoire die met de Independent Lifter wordt gebruikt, moet worden gecontroleerd om vast te stellen dat deze in goede staat zijn. Meld elke ongebruikelijke slijtage of schade aan uw plaatselijke geautoriseerde Prism Medical Service Provider.
- De Independent Lifter en bijbehorende plafondlift(en) zijn uitsluitend bedoeld voor het tillen en verplaatsen van een persoon. Prism Medical is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing of doelbewuste vernieling van de lift en/of de bijbehorende componenten.
- Overschrijd in geen geval de maximaal toegestane belasting van deze tillift. Raadpleeg het gedeelte "Specificaties" van deze gebruikershandleiding op pagina 4 en/of de labels op de tillift.
- Zorg dat er rondom de tillift een vrije ruimte is. Verplaats eventuele obstakels uit de weg alvorens de Independent Lifter te bedienen.
- De Independent Lifter kan na de aanbevolen levensduur buiten gebruik worden gesteld/worden weggegooid, in overeenstemming met regionale aanbevelingen voor de weggooien van specifieke onderdelen.

Bevestigen van de Quick Release-haak


In sommige gevallen bevat uw plafondlift mogelijk niet de quick release-haak die nodig is voor het gebruik van de

Independent Lifter. Deze haak kan eenvoudig op een C450/C625 plafondliftriem worden geïnstalleerd met behulp van de volgende methode:

Stap 1) Verkrijg een Quick Release-haak (635185).



Stap 2) Draai met een inbussleutel van 2 mm de stelschroef van de quick release-haak los en verwijder de pen.

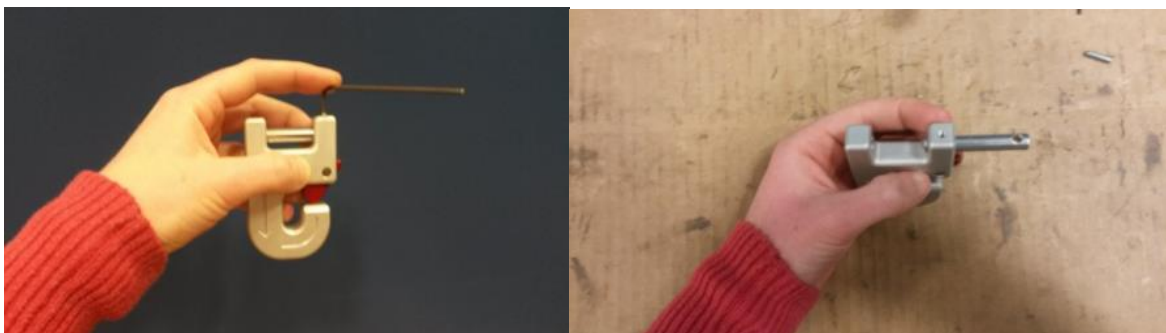

Stap 3) Steek de pin terug door de riem van de lift. Draai de stelschroef vast.



Stap 4) Zorg ervoor dat de riem vrij rond de pin kan draaien; de montage is voltooid. De Independent Lifter kan nu aan de plafondlift worden bevestigd.



Zorg ervoor dat de stelschroef (rode pijl) goed aansluit op het QRS onderdeel na het vastdraaien.

Bevestigen van de Independent Lifter

WAARSCHUWING

Veel van de volgende instructies vereisen bekendheid met het gebruik van een plafondlift. Lees de instructies bij de plafondlift om te begrijpen hoe u de lift met de instructies geleverd bij de Independent Lifter moet bedienen.

Stap 1) Plaats de Independent Lifter op een oppervlak waarop de plafondlift kan worden neergelaten om bij de QRS-haak te komen bevestigingspunt (zie pagina 3).

Stap 2) Laat de riem van de plafondlift zakken. Een plafondlift van Prism Medical vereist spanning om de riem te laten zakken. Als de riem niet naar beneden gaat, oefen dan lichte neerwaartse druk uit op de riem door deze naar beneden te trekken bij het laten zakken van de tillift.

Stap 3) Zodra de QRS-haak het QRS-haak-bevestigingspunt op de Independent Lifter bereikt, bevestig dan de QRS-haak aan de tillift (zie afbeelding 1).

Stap 4) Controleer, na de bevestiging van de Independent Lifter aan de plafondlift, of de rode vergrendeling op de QRS-haak goed gesloten is (zie afbeelding 2).

Stap 5) Haal de plafondlift met de bevestigde Independent Lifter omhoog en in positie voor gebruik of opslag.

Figure 1



Figure 2



Losmaken van de Independent Lifter

Stap 1) Beweeg de Independent Lifter en de plafondlift naar een plek waar de tillift veilig naar een oppervlak kan worden neergelaten.

Stap 2) Laat de plafondlift zakken tot een hoogte die voldoende speling geeft om de QRS-haak los te maken.

Stap 3) Eenmaal veilig neergelaten en als de Independent Lifter op een veilig oppervlak is, maak de rode vergrendeling op de QRS-haak los door naar beneden te drukken op de rode haakgrendel (zie afbeelding 3).

Stap 4) Maak de QRS-haak los van het bevestigingspunt op de Independent Lifter (zie afbeelding 4).

Stap 5) Haal de hijsriem omhoog en verplaats zowel de Independent Lifter als de plafondlift naar hun respectievelijke opslagplaatsen. Het wordt aanbevolen de riem van de plafondlift niet omhoog te hijsen tot een punt dat niet met de hand kan worden bereikt op een later tijdstip.

Figure 3



Figure 4




WAARSCHUWING

Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u de tillift van de ene locatie naar de andere verplaatst. Pas op voor en vermijd obstructies die letsel kunnen veroorzaken aan de persoon in de tillift of schade aan de lift.

Beensteunmaten

Gebruik dit als algemene leidraad voor de maat bij het selecteren van beensteunen.

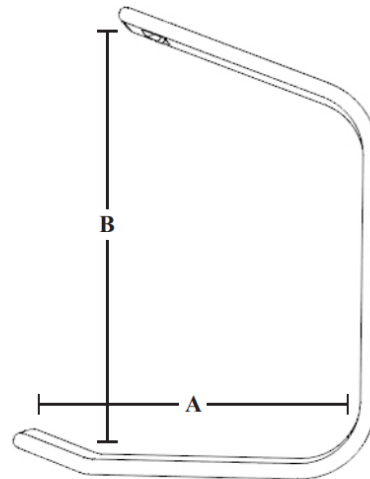

Size:	A	B
Small	5.1" (130mm)	6.3" (160mm)
Medium	7.3" (187mm)	8.9" (227mm)
Large	9.8" (249mm)	12.3" (312mm)

Stappen om te bepalen welke maat beensteun te bestellen bij een Independent Lifter:

Stap 1) Meet de omtrek van de dij van de eindgebruiker. De meting moet rond de dij worden gedaan, halverwege tussen de bovenkant van de knie en de onderkant van de heup.

Stap 2) Raadpleeg de afbeelding hierboven om de juiste maat beensteun te kiezen.

Stap 3) Als het been van de eindgebruiker op de grenslijn van twee verschillende maten ligt, kiest u het grotere formaat.

Beensteunen bevestigen aan Independent Lifter

Stap 1) Steek de riem met de gesp naar buiten gericht door de achterkant van de beensteun (Figuur 1).


Stap 2) Eenmaal door de beensteun, steek de riem door de gesp vanaf de onderkant omhoog door de gesp naar beneden te drukken om de riem erlangs te laten. Laat de gesp los zodra de riem erdoor is (Figuur 2).

Stap 3) Steek de riem door de onderste helft van de metalen schuif en haal hem in omgekeerde richting terug door de andere helft van de schuif.

Stap 4) Maak de riem net voldoende los om de beenriemsteun op de Independent Lifter te kunnen plaatsen. Zorg ervoor zodanig te bevestigen dat de openingen van de beensteunen naar buiten zijn gericht. Doe dit door de opening van de beensteunriem rond de torsosteunen te plaatsen en naar voren te schuiven tot op de gewenste positie op de Torso-steunbalk. Schuif vervolgens de O-ringen op hun plaats om de beensteunriem vast te zetten (figuur 5).

Stap 5) Volg dezelfde procedure voor de tweede beensteun.

Stap 6) Stel de riemen van beide beensteunen in tot ongeveer dezelfde lengte. Gesp naar buiten gericht.

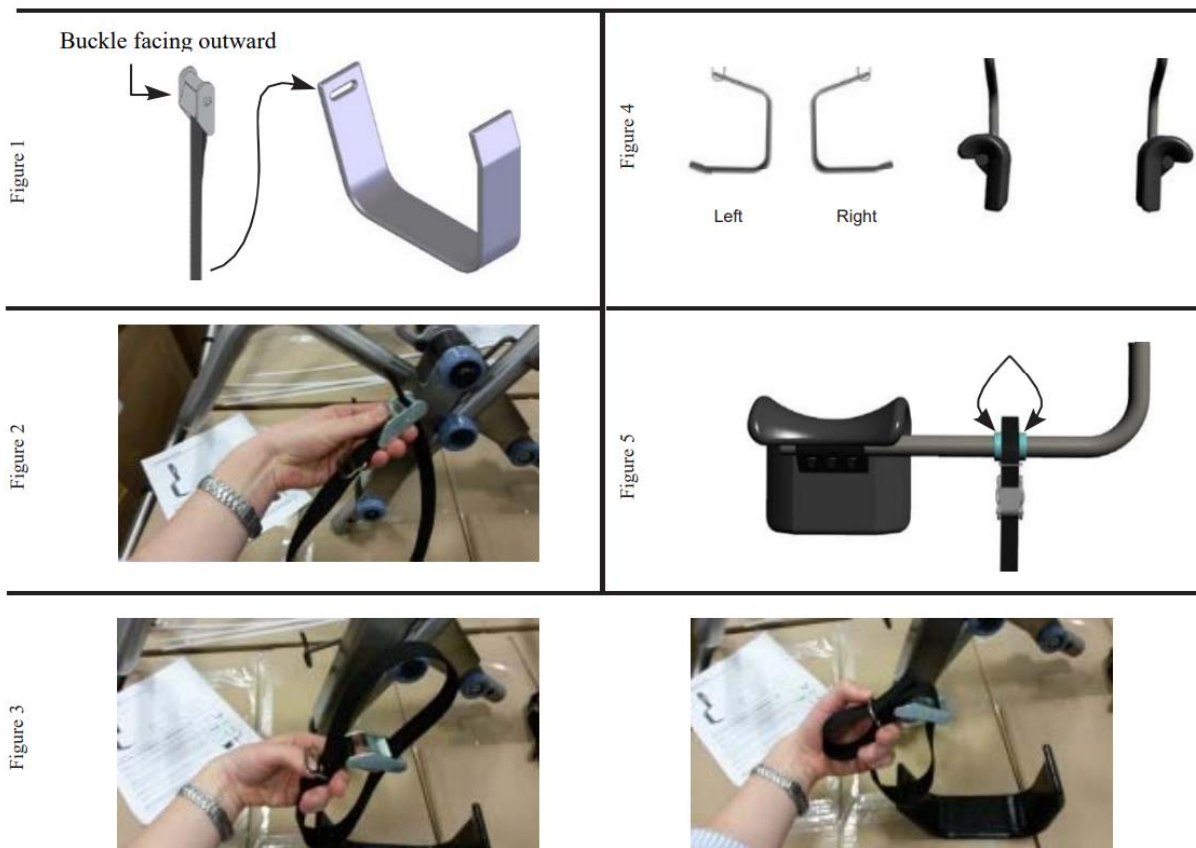

Basisbeginselen bij het verplaatsen van een persoon


LET OP: De volgende stappen zijn bedoeld om de algemene procedure te illustreren die komt kijken bij het tillen en verplaatsen van een persoon van de ene naar de andere locatie met behulp van de tillift.

De handleiding voor de plafondlift die in combinatie met de tillift wordt gebruikt, moet in detail worden bekeken voordat u deze stappen probeert uit te voeren, omdat de plafondlift die hier wordt geïllustreerd mogelijk niet dezelfde is als het gekochte exemplaar. Neem contact op met uw plaatselijke bevoegde Prism Medical-vertegenwoordigers als u vragen of opmerkingen heeft.

Stap 1) Plaats de Independent Lifter voor de cliënt. Pas de hoogte van de plafondlift aan zodat de torso-ondersteuningspads drie centimeter onder de onderarm zitten.

Stap 2) Plaats de Independent Lifter op de patiënt door de torsosteunen onder de oksels te plaatsen met de kromming van de torsosteunen rond de ribbenkast. Stel beensteunriemen en plaats de beensteunen onder de dijen op een comfortabele positie met de openingen naar buiten gericht. (Zie diagrammen hieronder).

Stap 3) De hoek die de cliënt na het heisen van een oppervlak aanneemt, kan worden aangepast door de positie van de beensteunen te veranderen naar hoger of lager op de dijen.

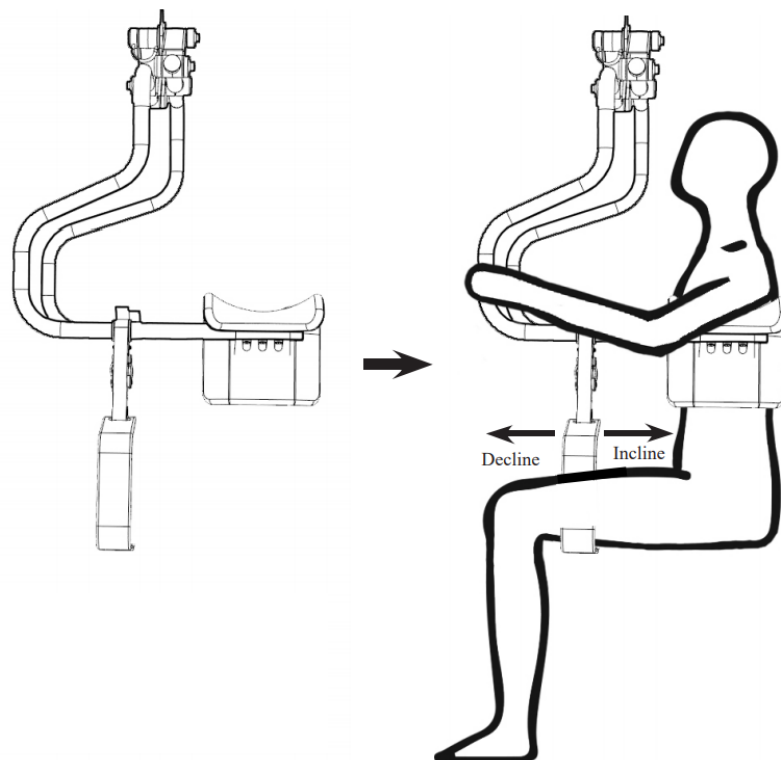

WAARSCHUWING

Zorg dat beensteunenmaat en drukafstelling (grijpkracht) geschikt is voor de lichaamsbouw en medische conditie van de cliënt.

Basisbeginselen bij het verplaatsen van een persoon (vervolg)

Stap 4) Til de lift op met behulp van de handbediening zodra de gebruiker op de juiste manier in de Independent Lifter zit. Hijs de lift hoog genoeg om omringende objecten te vermijden. Bekijk de beensteunen en zorg ervoor dat de riemen niet slippen/bewegen.

Stap 5) Eenmaal op een veilige hoogte kan de persoon worden verplaatst naar de gewenste locatie. Raadpleeg de handleiding voor de plafondlift voor bedieningsinstructies.

Stap 6) Wanneer de gewenste locatie is bereikt, kan de persoon in de tillift naar beneden worden gebracht/verhoogd tot de juiste hoogte om de verplaatsing te voltooien. Na voltooiing van het verlagen/verhogen zorgt u ervoor dat de persoon correct is gepositioneerd en veilig is ondersteund voordat de beensteunen van de tillift van de persoon worden verwijderd.

Stap 7) Verwijder de beensteunen van de dijen. Verplaats tillift en Independent Lifter vervolgens weg van de cliënt.

LET OP: Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u de tillift van de ene locatie naar de andere verplaatst. Kijk uit voor en vermijd obstructies die de persoon in de tillift kunnen verwonden of schade aan de tillift kunnen veroorzaken.

LET OP: Controleer altijd of de cliënt correct in de Independent Lifter is gepositioneerd bij het hijsen. Als herpositionering nodig is, laat dan zakken tot de ondergrond en verander de positie.

LET OP: Voordat u de beensteunen van de persoon verwijdert, controleer of de persoon die wordt opgetild veilig wordt ondersteund in de uiteindelijk gewenste houding.

LET OP: Zorg er bij het neerlaten van de tillift voor dat het hoofd van de cliënt niet in contact komt met de bovenkant van de armsteunstang.

LET OP: Plaats geen vingers in het schaarmechanisme aan de bovenkant van de Independent Lifter.

Er zijn geen bekende 'contra-indicaties' geassocieerd met het gebruik van de Independent Lifter, mits deze wordt gebruikt volgens de aanbevelingen en richtlijnen van de fabrikant. Het wordt echter Aanbevolen dat een cliënt-pecifieke beoordeling wordt gedaan door een getrainde en deskundige zorgverlener om de methode van verplaatsing te bepalen. Prism Medical beveelt geen vereiste aan wat betreft het aantal zorgverleners voor het gebruik van onze producten. Deze informatie en aanbeveling kan alleen worden verstrekt na een grondige gepersonaliseerde, casus-specifieke beoordeling, omdat er veel factoren zijn die van invloed kunnen zijn op deze beslissingen. Het is echter "verplicht" dat een cliënt die wordt gezien als een onafhankelijke gebruiker van onze plafond-lifttechnologie de mogelijkheid heeft om hulp te krijgen, tijdens de verplaatsing, in het geval van een liftstoring of persoonlijk zorg. Deze hulp kan worden verleend in de vorm van: een nabije gekwalificeerde verzorger, een telefoon, een communicatieapparaat, etc.

Algemene inspectie en onderhoud

A) Ieder gebruik – Uit te voeren door de gebruiker

Voorafgaand aan elk gebruik moet de Independent Lifter visueel worden geïnspecteerd. **Mocht een van deze items de inspectie niet doorstaan, gebruik de Independent Lifter dan niet.** Neem contact op met uw plaatselijke erkende dealer voor onderhoud.

Controleer visueel het volgende:

- De Independent Lifter is stevig bevestigd aan de QRS-haak van de lift met de "rode" grendel van de QRS liftriem in volledig gesloten positie. (Zie figuur 1)
- De torso-steunpads van de Independent Lifter vertonen GEEN tekenen van slijtage, vervorming of breuk. (Zie figuur 2)

De Independent Lifter beensteunen vertonen GEEN slijtage, vervorming of breuk.

- Het stiksel op de beensteunen waar het verbonden is met de gesp, vertoont GEEN tekenen van rafelen, slijtage of breken.
- Zorg tijdens het tillen dat de beensteunen NIET bewegen/slippen. Als er sprake is van beweging, laat de patiënt dan zakken en verzeker u van de juiste bevestiging van de riem en gesp met de beensteunen.
- Zorg ervoor dat de armen van de Independent Lifter vrij bewegen onder veerspanning.
- Stop het gebruik als u ongewone piepende of knarsende geluiden hoort van de Independent Lifter-unit.
- Volg de specifieke "voor-gebruik"-inspectie van de plafondlift om ervoor te zorgen dat de plafondlift veilig is om te gebruiken.

Figure 1



Figure 2



B) Maandelijks - Uit te voeren door de gebruiker

Als een van deze items de inspectie niet doorstaat, gebruik de Independent Lifter dan niet.

Neem contact op met uw lokale geautoriseerde dealer voor onderhoud.

- Voltooi de visuele inspectie zoals beschreven in het gedeelte "Ieder gebruik" hierboven.

Met niemand in de Independent Lifter of eraan verbonden, controleer het volgende:

- De armen van de Independent Lifter bewegen vrij onder veerspanning.
- Alle schroeven en bevestigingen zitten strak vast, vooral de schroeven die de torso-steunstangen bij elkaar houden (zie pagina 3).

C) Preventief onderhoud - Uit te voeren door een erkende technicus

Om een continu veilige en betrouwbare werking van Independent Lifter te waarborgen moet periodiek preventief onderhoud worden uitgevoerd met het hieronder aanbevolen interval:


- Over het algemeen is het aanbevolen interval voor preventief onderhoud jaarlijks. Raadpleeg uw lokale geautoriseerde dealer voor advies over de vraag of preventief onderhoud om de 6 maanden moet worden uitgevoerd of op jaarbasis. Over het algemeen, bij zeer frequent gebruik (meer dan 1000 tilbeurten per jaar), of in situaties waarin regelmatig cliënten worden opgetild die zwaarder zijn dan normaal, moet preventief onderhoud iedere 6 maanden plaatsvinden.

De volgende onderhoudstaken moeten worden volbracht:

- Volbreng de visuele inspectie zoals vermeld in het gedeelte "Maandelijks" hierboven.
- Inspecteer alle structurele onderdelen visueel, zoals de torso-draagstangen, torsosteunen en beensteunen en riemen op tekenen van slijtage, vervorming of breuk.
- Controleer of de trekveer op de juiste manier op zijn plaats wordt gehouden en normaal werkt.
- Controleer fysiek of alle bevestigingen goed vastzitten.

Independent Lifter - Bevestigingspunten

Gebruik het beschreven gereedschap om de bouten maandelijks vast te draaien in de getoonde gebieden.

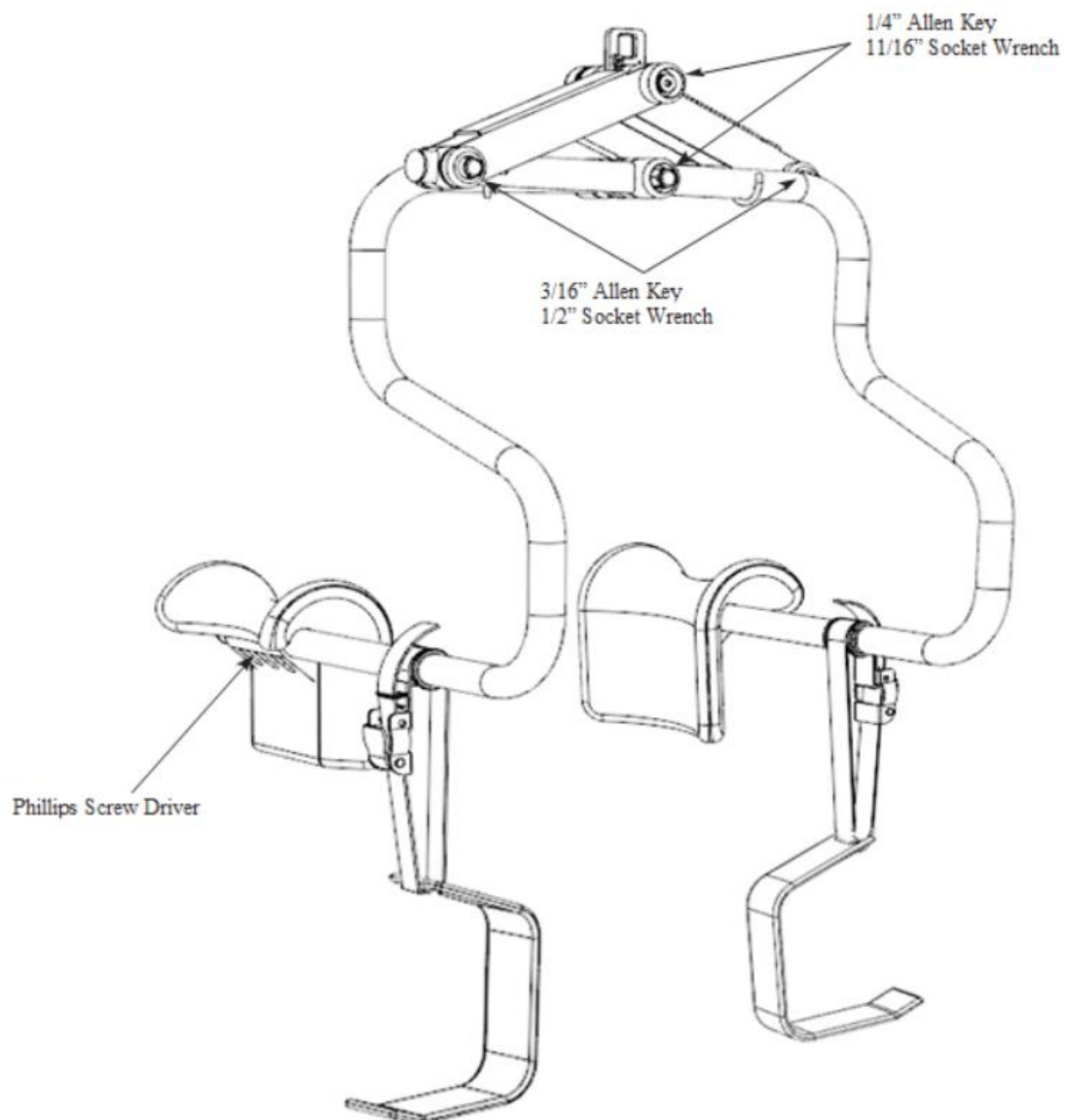

Independent Lifter-vervangingsonderdelen

Zie pagina 3 voor een schema van de onderstaande onderdelen.


Onderdeel nr:	Beschrijving:	Bevat:
341640	Reservearmsteunkit	armsteunpad en ijzerwaren
341650	Independent Lifter beensteunriemkit-Small	Enkele beensteun met riem en gesp

Independent Lifter - Nederlandse vertaling van de originele gebruikershandleiding Prism Medical (USA) Rev: 2 SEPT 2015, Domicare B.V., Zweedsestraat 8A13, 7418 BG Deventer. Tel.: 0570-62 44 62, www.domicare.nl.

341660	Independent Lifter beensteunriemkit-Medium	Enkele beensteun met riem en gesp
341670	Independent Lifter beensteunriemkit-Large	Enkele beensteun met riem en gesp

Aanpassen van de veerspanning voor de juiste maat

Uitsluitend uit te voeren door een door de fabrikant erkende technicus.

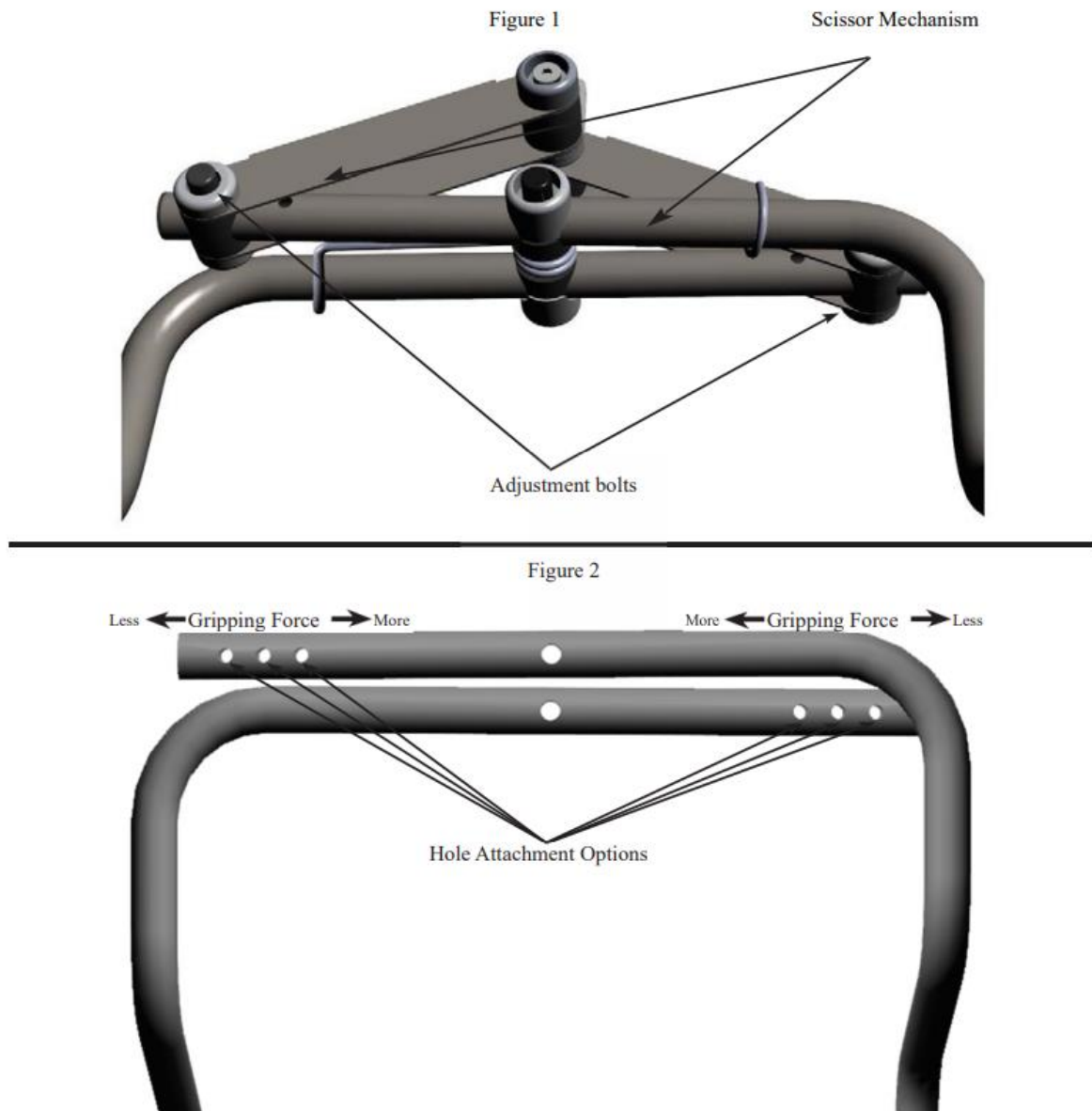

Stap 1) Draai de stelbouten los zoals getoond in Figuur 1 (zie pagina 13 voor het kiezen van het juiste gereedschap).

Stap 2) Beweeg het schaarmechanisme zodat deze op het gewenste gat past.

Stap 3) Bevestig het schaarmechanisme op het geselecteerde gat.

Stap 4) Herhaal dit voor de andere kant van de tillift. Zorg ervoor dat u hetzelfde gat voor beide armen gebruikt.

BELANGRIJK: hoe verder het gebruikte gat van het midden verwijderd is, hoe minder grijpkracht de tillift zal hebben (zie Figuur 2).

Onderhoudshistorie - Basisinformatie

AANKOOPINFORMATIE:

Productnaam: Independent Lifter Model:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Gekocht van:

(lokaal erkende Prism Medical-vertegenwoordiger)

Adres:

Stad, provincie:

Telefoonnummer:

Opmerkingen:

Postcode:

ONDERHOUDSINFORMATIE:

Neem contact op met het volgende bedrijf voor onderhoud:

Bedrijf:

(lokaal erkende Prism Medical-vertegenwoordiger)

Adres:

Stad, provincie:

Telefoonnummer:

Opmerkingen:

Postcode:

- Vul het volgende gedeelte over aankoop- en onderhoudsinformatie direct na de aankoop van dit apparaat in.
- Gebruik de onderhoudsgeschiedenis om alle gedane onderhoud en reparaties vast te leggen.
- Zorg ervoor dat de onderhoudsgeschiedenis wordt ondertekend en gedateerd bij iedere keer dat deze wordt gebruikt.

- Zorg dat dit apparaat regelmatig wordt onderhouden zoals beschreven in het gedeelte "Algemene inspectie en onderhoud".

Vul dit gedeelte in na elke onderhoudsbeurt, reparatie-inspectie en/of onderhoud. Kopieer extra pagina's wanneer nodig.

Datum:

Tijd:.....

Onderhoudstype:

(Periodieke inspectie Maandelijkse inspectie 6-maandelijkse inspectie Reparatie Jaarlijkse inspectie)

Anders:.....

Uitgevoerd door:.....

Naam in blokletters:.....

Handtekening:.....

Bedrijf:.....

Opmerkingen & ondernomen acties:

.....

.....

.....

.....

Datum:

Tijd:.....

Onderhoudstype:

(Periodieke inspectie Maandelijkse inspectie 6-maandelijkse inspectie Reparatie Jaarlijkse inspectie)

Anders:.....

Uitgevoerd door:.....

Naam in blokletters:.....

Handtekening:.....

Bedrijf:.....

Opmerkingen & ondernomen acties:

.....

.....

.....

.....

Datum:

Tijd:.....

Onderhoudstype:

(Periodieke inspectie Maandelijkse inspectie 6-maandelijkse inspectie Reparatie Jaarlijkse inspectie)

Anders:.....

Uitgevoerd door:.....

Naam in blokletters:.....

Handtekening:.....

Bedrijf:.....

Opmerkingen & ondernomen acties:

.....

.....

.....

.....

Datum:

Tijd:.....

Onderhoudstype:

(Periodieke inspectie Maandelijkse inspectie 6-maandelijkse inspectie Reparatie Jaarlijkse inspectie)

Anders:.....

Uitgevoerd door:.....

Naam in blokletters:.....

Handtekening:.....

Bedrijf:.....

Opmerkingen & ondernomen acties:

.....

.....

.....

.....

Datum:

Tijd:.....

Onderhoudstype:

(Periodieke inspectie Maandelijkse inspectie 6-maandelijkse inspectie Reparatie Jaarlijkse inspectie)

Anders:.....

Uitgevoerd door:.....

Naam in blokletters:.....

Handtekening:.....

Bedrijf:.....

Opmerkingen & ondernomen acties:

.....

.....

.....

.....

Datum:

Tijd:.....

Onderhoudstype:

(Periodieke inspectie Maandelijkse inspectie 6-maandelijkse inspectie Reparatie Jaarlijkse inspectie)

Anders:.....

Uitgevoerd door:.....

Naam in blokletters:.....

Handtekening:.....

Bedrijf:.....

Opmerkingen & ondernomen acties:

Garantie

Deze garantie beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten op geen enkele manier.

1. Prism Medical biedt garantie op alle apparatuur, waaronder plafondliften, vloerliften, tilbanden, serviceonderdelen en

rails en accessoires, geleverd als nieuw, tegen gebreken voor een periode van 1 jaar na datum van installatie of

18 maanden na fabricagedatum, welke van de twee het kortst is, in geval van defecten in materiaal of vervaardiging.

2. Prism biedt garantie op alle geleverde gereviseerde apparatuur tegen gebreken voor een periode van drie maanden na datum van installatie of zes maanden na datum van aankoop, welke van de twee het kortst is.

3. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die te wijten zijn aan normale slijtage, schade door natuurlijke krachten, nalatigheid van de gebruiker, of verkeerd gebruik of opzettelijke vernieling, of batterijen meer dan 90 dagen na oorspronkelijke aankoop.

4. Deze garantie zal vervallen als de apparatuur niet wordt onderhouden door Prism Medical of haar geautoriseerde onderhoudsmedewerkers in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, of als een niet-geautoriseerde persoon werkzaamheden uitvoert aan de uitrusting.

5. De aansprakelijkheid van Prism Medical onder de voorwaarden van deze garantie is beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen en in geen geval zal Prism Medical aansprakelijk zijn voor gevolgschade of onvoorziene verliezen.

Als u vragen heeft over de fabricage of werking van deze apparatuur, neem dan contact op met Prism Medical, of uw lokale geautoriseerde dealer.

CONTACT

Importeur: Domicare B.V.

Zweedsestraat 8A13

7418 BG Deventer

Tel.: 0570-62 44 62

Email: info@domicare.nl

www.domicare.nl

Producent: Prism Medical Canada / USA

485 Millway Ave., Unit 2

Concord, ON L4K 3V4

CANADA

Tel: 416-260-2145

Fax: 416-260-5580

Tolvrij: 1-877-304-5438

www.prismmedical.ca

10888 Metro Ct.

Maryland Heights, MO 63043

USA

Tel: 314-692-9135

Fax: 314-692-7858

Tolvrij: 1-866-891-6502

www.prismmedicalltd.com

Dit document voldoet aan de EN ISO 10535-vereisten.